

Gesichtsschutzschild „V2-basic“



PROTEC3D – Vinzentiusstraße 35 – 83395 Freilassing – Deutschland
Telefon: +49 8654 1299 114 – Telefax: +49 8654 1299 115
Email: mail@protec3d.de – Web: www.protec3d.de
Geschäftsinhaber: Herr Alexander Reizner

Copyright © 2013-2020. PROTEC3D – Alle Rechte vorbehalten.



Gebrauchsanleitung - Gesichtsschutzschild „V2-basic“


Hergestellt gemäß der technischen Regel: DIN EN 166 : 2001

Hersteller: Alexander Reizner – PROTEC3D / Vinzentiusstraße 35 / 83395 Freilassing / Deutschland
Zertifizierungsstelle: ECS GmbH / Hüttfeldstr. 50 / 73430 Aalen / Deutschland / Notifizierte Stelle 1883

Haftungsausschluss: Eingesetzt für den beschriebenen Verwendungszweck erfüllt das Gesichtsschutzschild V2-basic die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Ferner erfüllt es die Anforderungen der europäisch harmonisierten Norm EN 166 : 2001 (teilweise angewandt). Geprüft und zertifiziert hat dieses Augenschutzprodukt die notifizierte Stelle: ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland (NB 1883). Für Anwendungen im medizinischen Umfeld erfüllt das Produkt die Anforderungen der Verordnung für Medizinprodukte (EU) 17/745. Demnach sind die Gesichtsschutzschilder als Klasse 1 Produkte einzustufen.

Verwendungsbereich: Das mit dieser Anleitung gelieferte Gesichtsschutzschild (Modell V2-basic) eignet sich zum Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben. Das Gesichtsschutzschild ist kombinierbar mit Schutzbrillen, persönliche korrigierende Brillen und Gesichtsschutzmasken.

Produktbeschreibung: Das Gesichtsschutzschild besteht aus drei Einzelteilen, welche einfach miteinander verbunden und wieder voneinander gelöst werden können. Von links n. rechts: **Kopffrahmen – Kopfband – Sichtscheibe – vollständig montierter Gesichtsschutzschild.**

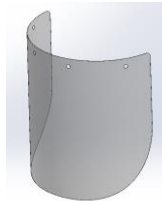

Kennzeichnung des Tragekörpers: **P3D** = Kennbuchstaben Hersteller; **166** = Nummer der Norm; **CE** = EG-Konformitätszeichen.

Kennzeichnung der Sichtscheiben: **P3D** = Kennbuchstaben Hersteller; **1** = optische Klasse; **3** = Verwendungsbereich; **CE** = EG-Konformitätszeichen.

Haben Sichtscheiben und Kopfteile nicht die gleichen Kurzzeichen **S**, **F**, **B** und **A**, so ist dem gesamten Augenschutzgerät der niedrigere Verwendungsbereich zuzuordnen.

Unbedenklichkeitserklärung: Bei besonders empfindlichen Personen könnten bei Hautkontakt unter Umständen allergische Reaktionen auftreten. Es wurden gezielt hochwertige Materialien aus dem medizinischen Bereich verwendet, um dieses Risiko zu minimieren.

Ersatzteile: Für das Modell V2-basic sind Ersatz-Sichtscheiben erhältlich. Der Kopffrahmen und das Kopfband können bei guter Pflege langjährig verwendet werden. Bei Beschädigung von einem der drei Bauteilen ist das Gesichtsschutzschild nicht mehr zu verwenden.

Trageempfehlungen: Das Kopfband muss auf den richtigen Kopfdurchmesser eingestellt werden. Das Kopfteil soll nicht zu locker und nicht zu eng anliegen damit ein möglichst hoher Tragekomfort gewährleistet ist. Die Sichtscheibe sollte nicht am Gesicht anliegen, sondern eine leichte abgewandte Neigung vom Kinn weg vorweisen damit die Sichtscheibe nicht beschlagen kann.

Zubehör: Optionales Zubehör ist für das Modell V2-basic vorerst nicht verfügbar. Das höherwertigere Modell V3-pro ist aber bereits in Planung.

Lagerung: Das Gesichtsschutzschild sollte bei normaler Raumtemperatur trocken, staubfrei und falls möglich vor UV-Licht geschützt gelagert werden.

Reinigung: Das Gesichtsschutzschild kann mit klarem Wasser und einem kratzfreien Seidentuch gereinigt werden. Bei mehrfacher Verwendung empfehlen wir das regelmäßige Erneuern der Sichtscheibe. Achtung! Die Sichtscheibe kann leicht verkratzen und sollte daher geschützt gelagert werden. Kein Papiertuch zur Reinigung verwenden!

Desinfektion: Das Gesichtsschutzschild ist nach Gebrauch zu desinfizieren / sterilisieren und bei Bedarf die Sichtscheibe zu erneuern.

Der Kopffrahmen sowie das Kopfband können bei 60° C bis 100° C sterilisiert werden und sind beständig gegen die meisten alkoholbasierten Desinfektionsmittel. Die Einzelteile des Gesichtsschutzschildes können mit handelsüblichen Alkoholbasierten Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Entsorgung: Bei der Entsorgung des Artikels sind die national gültigen Vorschriften zu beachten.

Verwendungsdauer: Das Produkt sollte spätestens 3 Jahre nach dem Kaufdatum nicht mehr verwendet werden.

Warnhinweise: Nach einem Schadensfall das Gesichtsschutzschild nicht mehr verwenden! Nicht selbst reparieren, sondern entsorgen!

Das Gesichtsschutzschild sollte von medizinischem Fachpersonal und von Mitarbeitern der Rettungsdienste verwendet werden und dieses nur für die Dauer der derzeitigen COVID-19-Gesundheitsbedrohung. Es sollte keine Tätigkeiten durchgeführt werden, bei denen eine unbeeinträchtigte Sicht zwingend erforderlich ist. Das Gesichtsschutzschild V2-basic kann nur bei ordnungsgemäßer Montage und richtiger Einstellung die bezweckte Sicherheit gewährleisten.

Abnehmbare Teile dürfen nicht separat getragen werden. Wird der Gesichtsschutzschild über einer Korrektionsbrille getragen, können mechanische Einwirkungen (z.B. Stöße) übertragen werden und somit eine Gefährdung darstellen.

Verwendungsgrenzen: Dieser Gesichtsschutzschild ist nicht zum Schutz- gegen mechanische Einwirkungen, brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art, Funken, Bestrahlung, vor ionisierender oder nicht-ionisierender Strahlung, beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten geeignet.

Konformitätserklärung: Eine EU-Konformitätserklärung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über PSA und der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit ist auf folgender Internetseite für dieses Produkt abrufbar: www.protec3d.de/gesichtsschutz

PROTEC3D – Vinzentiusstraße 35 – 83395 Freilassing – Deutschland
 Telefon: +49 8654 1299 114 – Telefax: +49 8654 1299 115
 Email: mail@protec3d.de – Web: www.protec3d.de
 Geschäftsinhaber: Herr Alexander Reizner

Copyright © 2013-2020. PROTEC3D – Alle Rechte vorbehalten.



Montageanleitung - Gesichtsschutzschild „V2-basic“

Das Gesichtsschutzschild „V2-basic“ besteht aus drei Einzelteilen, welche einfach miteinander verbunden und wieder voneinander gelöst werden können.



- 1.) Kopffahmen
- 2.) Kopfband
- 3.) Sichtscheibe



Die Schutzfolien auf beiden Seiten der Sichtscheibe vor der Benutzung entfernen!



Das **Kopfband** können Sie an den hinteren beiden Laschen des **Kopffrahmens** im gewünschten Abstand einfädeln. Es ist so gelocht, dass die gängigen Kopfdurchmesser eingestellt werden können. (XXS - XS - S - M - L - XL)



Die **Sichtscheibe** können Sie einfach auf die Haltepins aufstecken. Beginnen Sie von den mittleren Pins und gehen Sie nach außen. **Entfernen Sie zuerst die beidseitig aufgebraachten Schutzfolien bevor Sie die Sichtscheibe am Kopffrahmen montieren!**



Die äußeren Pins des **Kopffrahmens** sind federnd ausgeführt. Somit kann die **Sichtscheibe** einfach montiert und ein sicherer Halt gewährleistet werden.



Hier sehen Sie das korrekt zusammengebaute Gesichtsschutzschild. **Achten Sie darauf, dass unser Firmenlogo auf der Oberseite sichtbar ist!** Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Produkt haben, können Sie sich gerne bei uns melden.

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Diese Konformitätserklärung gilt für das folgende Produkt:
This EU Declaration of Conformity is valid for the following item:

Hersteller Produktbezeichnung: V2-basic
Manufacturer product name: V2-basic

PSA-TYP (EU) 2016/425: Gesichtsschutzschild zur Reduzierung durch Tröpfcheninfektion
Face-cover-shield to reduce droplet infection

Augenschutz Kategorie: Klasse I
Eye protection category: Class I

Hersteller: Alexander Reizner – PROTEC3D
Manufacturer: **Vinzentiusstraße 35**
83395 Freilassing
Deutschland



Die Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller sowie dessen Lieferanten.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and his suppliers.

Der Gesichtsschutzschild entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Richtlinie 2001/95/EG über die Allgemeine Produktsicherheit.

The Face-cover-shield complies with the relevant Union harmonisation legislation:
Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE) Directive 2001/95/EC on general product safety

Die folgende harmonisierte Europäische Norm wurde für die Erklärung dieser Konformität verwendet:
The following harmonised European Standard has been used to declare conformity:

DIN EN 166 : 2001, teilweise anwendbar. Partially applicable.

Verwendete Werkstoffe / Material used:

Kopfraumen / Headframe: Kunststoff (plastic)
Kopfband / Headband: Kunststoff (plastic)
Sichtscheibe / Faceshield: Organische Sichtscheibe (Kunststoff) organic lens (plastic)


Vorgesehene Verwendungsbereiche: Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten.
Areas of use: Protection against splashes of liquids.

Kennzeichnung des Gesichtsschutzschilds: P3D 1 3 CE
Marking of Face-cover-shield:

Die notifizierte Stelle ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland, hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt (Prüfnummer / Prüfbericht: Nr. 1151-ECS-20 / MR 11511-ECS-20) und die Baumusterbescheinigung ausgestellt.

The notified body ECS GmbH, Hüttfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany, has performed the EU-type examination (Test-number / test report: Nr. 1151-ECS-20 / MR 11511-ECS-20) and issued the type certificate.

Freilassing den 06.05.2020

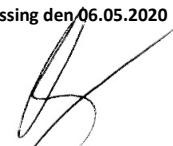
Alexander Reizner – PROTEC3D
Geschäftsinhaber / Business owner

